

新型コロナウイルスに現在かかっているか **セルフ検査で** どうか **分かる!**

新型コロナウイルス 抗原検査キット

COVID-19 COVID-19 Ag Saliva Test Kit



抗原検査とは

抗原検査とは唾液などで、PCR検査と同様に

今現在コロナに感染しているか を簡単に調べられる検査です。

15分ほどの短時間で特別な機器も使わず自宅でセルフ検査が出来ることから、帰省や食事会など、大事な人と会う前に検査することが出来ます。

また、咳が出る、味覚が無い、熱が出るなどの症状前でも、自宅に置けばいつでも検査して感染確認が可能です。

唾液で検査。15分で判定

	抗原検査	PCR検査	抗体検査
調べる物	感染した細胞が産生する抗原を検出	ウィルスの遺伝子を増幅して検出	免疫反応で作られるタンパク質を検出
検査目的	現在ウィルスに感染しているか検査	現在ウィルスに感染しているか検査	過去ウィルスに感染していたか検査 (IgM抗体は発症中の可能性も高い)
検体	粘膜、痰、唾液	粘膜、痰、唾液など	血液
判定までに要する時間	15分	半日から2日	15分
検査機器	簡易キット	大規模	簡易キット

COVID-19 Ag Saliva Test Kit



唾液で検査。
簡単＆痛みなし。



1セット～
1セットから購入可能



検査から結果まで
たった15分



CEマーク取得済み



正診率97.5%の
高精度

セット内容

- 検査キット本体 1個
 - 抽出液入りボトルとキャップ 各1個
 - 紙コップ 1個
 - 唾液採取用スポイト 1本
- 日本語説明書付き



※ 本製品は調査研究用であり、医療品医療機器法に基づく体外診断薬用医薬品として承認・認証等を受けておりません。診断目的では使用できません。


1 付属の紙コップに唾液を採取します。




2 抽出液入りチューブの蓋を、キャップの先端部で穴を開け、キャップは一度取り外します。

※チューブの蓋は使用直前に開封してください。


※机に置く際も、先端部は上にむけ、机に触れないように置いてください。

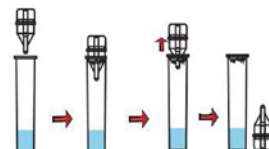

3 採取した唾液をスポイトで（スポイトの）黒線まで吸い取り、抽出液入りボトルに入れます。

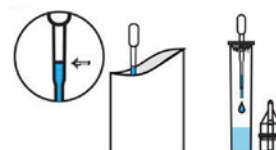


4 キャップを戻し、蓋をしっかりと締めて10回程軽く振ります。振った後、1分待ちます。

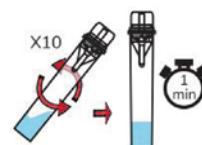

5 キャップのカバーを取り、最初の2滴は破棄します。次に、検査キット本体の小さい丸の箇所に3滴滴下します。15分後の結果で判定します。

※30分以上経過したものでは分析しないでください

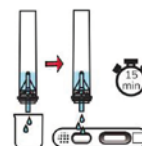

製造元について



社名：Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd.
住所：Room 403, Building 1, 1 Taoyuan RD, Songshan Lake
Science and Technology Industrial Park, Songshan Lake,
Dongguan, Guangdong, 523808, China

医療機器の研究、開発、販売に特化し、2019年12月に設立された中国の会社。従業員数は約400人で、研究開発チームは20年以上の経験を持つ。検査キットは世界大手の体外診断用医薬品の原料供給メーカーFapon Biotech社と協同開発され、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシア、トルコ他、多くの国々での販売実績がある。

本製品はCEマークを取得しています

CEマークとは、EU加盟国において製品を販売するために求められる安全性能基準を満たしていることを証明するマークです。製品の使用者の健康と安全性などに関する信頼の証となっています。



■ 使用上の注意

1. 本製品による結果だけで決定づけるのではなく、診断は、医師によるその他臨床的特徴および検査所見等を元に行ってください。新型コロナウイルス感染症の罹患が疑われる場合には、受診相談センター又は医療機関にご相談ください。
2. 本製品の使用は研究用に限り、臨床診断の目的としては使用できません。
3. 検査は説明書に従って行ってください。間違った手順で行われた場合や正しく保管されていなかった場合、検査結果が正しく表示されなくなる可能性があります。
4. 一度使用した検査キット等は再利用せず、破棄してください。
5. 検体の量が少なすぎたり多すぎたりすると、誤った判定がでることがありますので、量を守ってください。
6. 検体内の抗原量が少ない場合、誤って陰性として表示される場合があります。
7. 検体取り扱い中は、使い捨て手袋を使用し、検査後は手洗いをしてください。
8. 検査キット本体は、使用する直前に開封してください。高温多湿を避けてください。
9. 抗原の有無を確認するものであり、抗原の量は量れません。
10. 使用後は、お住まいの自治体の分別に従って破棄してください。